

Navina Smart - Productinformatie

Beschrijving van het product

Transanaal irrigatiesysteem met elektronische controle-unit.

Houdbaarheid en aantal keren gebruik

Alle onderdelen van het Navina Irrigatiesysteem hebben een houdbaarheid van 3,5 jaar, met uitzondering van de Navina katheters en de Navina conus, die een houdbaarheid van 2 jaar hebben. Wanneer Navina onderdelen in sets zijn verpakt, is het onderdeel met de kortste houdbaarheid bepalend voor de houdbaarheid van de set.

Houd er rekening mee dat er voor de Navina Smart controle-unit ook een 'gebruiksdatum' is die staat ingesteld op 1,5 jaar vanaf de productiedatum.

Navina katheters en conussen zijn voor eenmalig gebruik. De watercontainer kan 15 keer worden gebruikt, de slangenset 100 keer en de Navina Smart controle-unit 400 keer of twee jaar vanaf de datum van het eerste gebruik.

Materiaalsamenstelling

Kathetermateriaal: styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS)/polypropyleen (PP) met een hydrofiele polyvinylpyrrolidon (PVP)-coating.

Primair verpakkingsmateriaal: zakje van PE/nylon.

Secundair verpakkingsmateriaal: karton en golfkarton.

Beoogd gebruik

Navina Systems is bedoeld voor darmspoelen door water via een rectale conus in het onderste deel van de darm in te brengen.

Indicaties voor het gebruik

Navina Systems is geïndiceerd als hulpmiddel voor volwassenen en voor kinderen vanaf 3 jaar die lijden aan fecale incontinentie, chronische constipatie en/of een moeizame stoelgang hebben. Door water in het onderste deel van de darm in te brengen, wordt de peristaltiek in de darmen gestimuleerd om de inhoud van het laatste deel van de darm en de endeldarm te ledigen.

Contra-indicaties

Gebruik Navina Systems **NIET** als bij u sprake is van één of meer van de volgende aandoeningen:

- Bekende anale of colorectale stenose.
- Een actieve ontsteking aan de darm.
- Acute diverticulitis.
- Colorectale kanker.
- Ischemische colitis.
- Anale of colorectale chirurgie die minder dan drie maanden geleden heeft plaatsgevonden.
- Een endoscopische polypectomie die minder dan 4 weken geleden heeft plaatsgevonden.

In deze lijst staat mogelijk niet alles vermeld. Uw zorgverlener zal altijd rekening houden met de persoonsgebonden factoren van een gebruiker.



Navina Smart System

Referentie	Type	Specificaties
6900965	Navina Smart systeem Regular (normaal)	1 Navina Smart controle-unit 1 voedingsadapter
6901065	Navina Smart systeem Small (klein)	1 kabel 1 watercontainer
6901965	Navina Smart systeem conus	1 slangenset 2 rectaalkatheters 1 Navina opbergkoffer 1 set accessoires
6900300	Navina verbruiksset Regular (normaal)	
6900400	Navina verbruiksset Small (klein)	1 watercontainer 15 rectaalkatheters
6901600	Navina verbruiksset conus	
6894000	Navina katheterset Regular (normaal)	
6894300	Navina katheterset Small (klein)	10 rectaalkatheters
6901100	Navina slangenset	1 katheterslang 1 watercontainer-slang
6901200	Navina accessoires	2 grijpringen (1 verticaal, 1 horizontaal) 1 nekkoord 1 positioneringsband 1 Navina Smart positioneringsclip
6901465	Navina Smart controle-unit	1 Navina Smart controle-unit 1 voedingsadapter 1 kabel
6901500	Navina Smart voedingsadapter en kabel	1 voedingsadapter 1 kabel

Navina™ Smart



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.nl

CE 2797

Rx Only