

LoFric Hydro-Kit – voor mannen

LoFric® Hydro-Kit™, hydrofiele urinekatheter voor eenmalig gebruik met zoutoplossing voor activatie.

Voor kort- en langdurend blaasmanagement middels intermitterende katheterisatie via de plasbuis.

LoFric katheters zijn alleen voor gebruik op recept.


Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik het advies en de training voor de katheterisatieprocedure van uw zorgverlener opvolgt.

Raadpleeg de in de verpakking bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor belangrijke informatie en volledige instructies.

Neem contact op met uw voorschrijver als u problemen ondervindt.

Gebruiksaanwijzing

1. Was uw handen goed met water en zeep.
2. Houd het product rechtop. Vouw het sachet dubbel en knijp erin. Laat de zoutwateroplossing naar de katheter lopen.
3. Houd de verpakking ondersteboven zodat de zoutwateroplossing terugstroomt in de opvangzak.
4. Scheur de verpakking bij inkeping "A" open om de tip van de katheter vrij te maken.
5. Scheur de verpakking bij inkeping "B/C" open. Gebruik het gedeelte "B" als inbrenghulp.
6. Trek de katheter voorzichtig uit de verpakking totdat de conus blijft steken om de verbinding tussen de katheter en de opvangzak af te dichten.
7. Til de penis op in de richting van de buik om de plasbuis te strekken. Breng de katheter voorzichtig in de plasbuis in. Wanneer de urine begint te stromen, duwt u de katheter iets verder zodat de beide katheterogen zich in de blaas bevinden.
8. Buig de penis naar beneden wanneer de urine door de katheter begint te stromen.
9. Wanneer de urinestroom stopt, trekt u de katheter langzaam een klein beetje terug. Als de urine weer begint te stromen, wacht u met het terugtrekken totdat er geen urine meer uit de katheter komt. Zo bent u er zeker van dat de blaas helemaal leeg is. Vervolgens verwijdert u de katheter uit de plasbuis.
10. Schuif de katheter terug in de opvangzak.
11. Voordat u de zak in zijn geheel weggooit, leegt u de zak via de opening of u legt een knoop in het uiteinde van de zak om die dicht te maken en scheurt u de zak open bij de inkeping om de zak te legen. Gooi de katheter op de voorgeschreven manier weg (plaatselijke voorschriften kunnen verschillen).

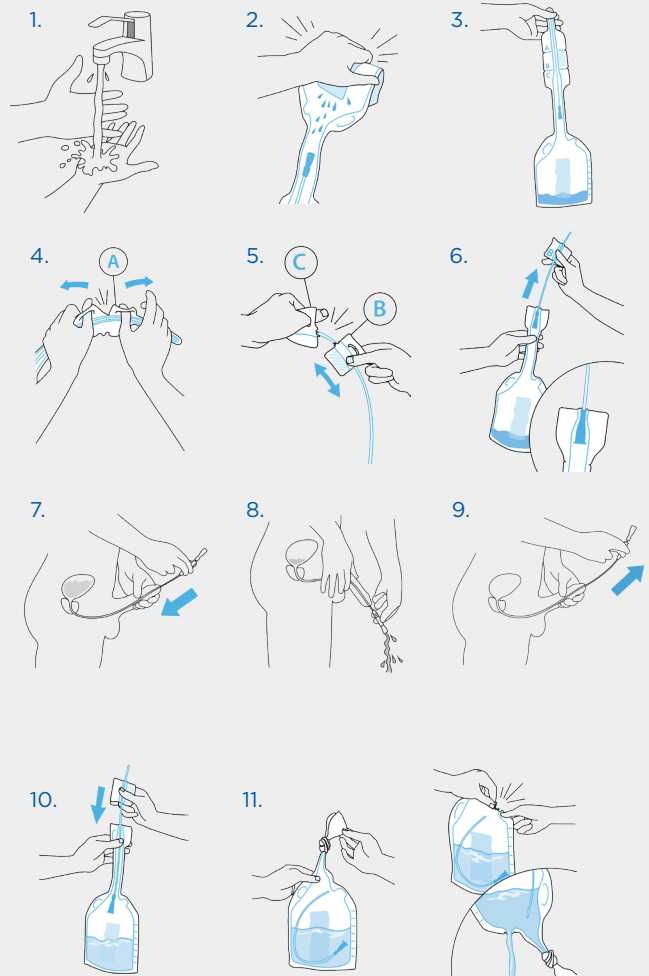


Speciale instructie voor Tiemann katheter, met licht gebogen tip.

Voor het gebruik van een Tiemann katheter is een speciale techniek nodig. Overleg met uw zorgverlener voor training en advies.

1. Stel vast waar de markering zich op de conus bevindt ten opzichte van de gebogen kathetertip voordat de katheter wordt ingebracht. Gebruik die markering als referentie om de gebogen tip tijdens het gebruik van de katheter in de juiste richting te houden.
2. Houd tijdens het inbrengen van de katheter en tijdens de katheterisatie de gebogen tip naar boven gericht in de richting van de buik, alsook tijdens het terugtrekken van de katheter. Of volg de specifieke instructies van uw zorgverlener.

N.B. Gebruikte katheters mogen niet worden weggegooid met huishoudelijk plastic afval, omdat de katheter resten urine bevat. Indien de gebruikte katheter niet wordt teruggeplaatst in de verpakking, mag die verpakking wel met het huishoudelijk plastic afval worden weggegooid. Een gebruikte katheter moet bij het restafval worden afgevoerd.

Tiemann

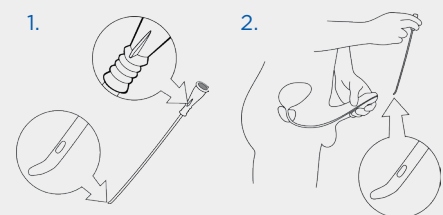

Bij Wellspect ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbetert van mensen met blaas- en darmproblemen. Gebruikers kunnen weer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid opbouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn ervaren. Al meer dan 40 jaar zijn wij toonaangevend in de sector met onze productmerken LoFric® en Navina™. Wij streven er altijd naar om de impact van onze producten op het milieu tot een minimum te beperken en op termijn klimaatneutraal te worden. Door samen te blijven werken met gebruikers en zorgverleners kunnen we klinische resultaten op een duurzame manier verbeteren, nu en in de toekomst.

Wellspect. **A Real Difference.**

Kijk voor meer informatie over onze producten en diensten op [Wellspect.nl](https://www.wellspect.nl).

[wellspect.nl](https://www.wellspect.nl)

Wellspect BV, Signaalrood 55, 2718 SG, Zoetermeer, Nederland

Tel. NL: +31 79 363 70 10. Fax NL: +31 79 362 37 48. www.wellspect.nl

